


# UTILISATION DU GENUAIR®

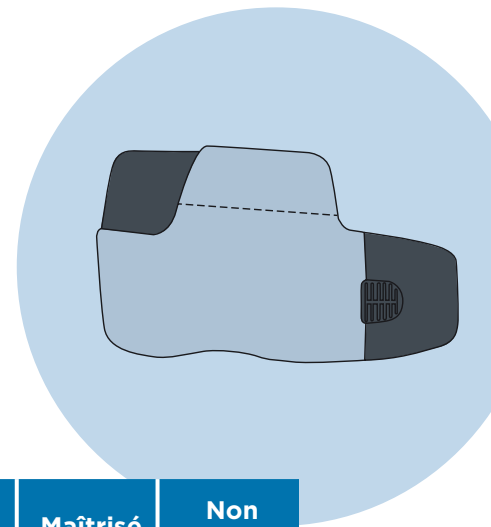

Médicament : \_\_\_\_\_  
 Indication (entretien ou secours ou entretien+secours) : \_\_\_\_\_  
 Nombre d'inhalation : \_\_\_\_\_ Nombre de fois par jour : \_\_\_\_\_  
 Autres informations : \_\_\_\_\_



		Maîtrisé	Non maîtrisé
<b>1</b>	Préparer le dispositif: <b>a.</b> Retirer le capuchon protecteur en appuyant légèrement sur les flèches de chaque côté du capuchon		
<b>2</b>	Tenir l'inhalateur à l'horizontal et appuyer sur le bouton presseur jusqu'au bout puis relâcher: <b>a.</b> Un déclic se fera entendre <b>b.</b> La fenêtre devient verte attestant que la dose est prête		
<b>3</b>	Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer		
<b>4</b>	Placer l'embout buccal entre les lèvres et les dents		
<b>5</b>	Inspirer par la bouche fortement et profondément: <b>a.</b> Un déclic se fait entendre pour indiquer que l'inhalateur est utilisé adéquatement: il faut continuer à inspirer pour prendre toute la dose <b>b.</b> On peut suggérer d'inspirer « rapidement » si le patient n'arrive pas à déclencher le dispositif <b>c.</b> La fenêtre redeviendra rouge pour indiquer que la dose a été prise		
<b>6</b>	Éloigner le dispositif de la bouche		
<b>7</b>	Respecter un temps de pause: retenir la respiration 5 à 10 secondes		
<b>8</b>	Expirer par le nez		
<b>9</b>	Replacer le capuchon protecteur		

## REMARQUES

Afin de limiter les effets indésirables de la médication, se rincer la bouche avec de l'eau (ne pas avaler l'eau).

**ENTRETIEN :** \_\_\_\_\_

**COMMENT SAVOIR S'IL EST VIDE :** \_\_\_\_\_



**RQESR**

RÉSEAU QUÉBÉCOIS D'ÉDUCATION  
EN SANTÉ RESPIRATOIRE

La référence des professionnels